

再使用禁止

ワンタッチアクロランセット

【警告】

- 1.採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。
傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
- 2.使用後の穿刺針には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
- 3.穿刺針を穿刺器具に装着したまま放置しないでください。[誤って穿刺される危険性があります。]

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止。一度使用した穿刺針は必ず廃棄してください。[感染の危険性があります。]
- 2.一度保護キャップをはずした穿刺針は、再度保護キャップを装着しないでください。[感染の危険性があります。]
- 3.使用時にすでに保護キャップがはずれていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[感染の危険性があります。]
- 4.穿刺器具に装着されていない状態で保護キャップをひっぱって取りはずさないでください。[針が飛び出す危険性があります。]


【形状・構造及び原理等】

1.材質

- 針 : ステンレス鋼
保護キャップ : ポリエチレン
ケース : ポリスチレン

2.寸法

- 針の太さ : 33G

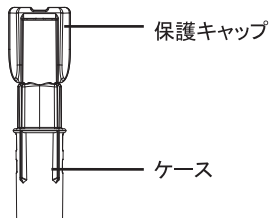

組み合わせ医療機器(別売)

- 販売名 : ワンタッチアクロ
医療機器届出番号 : 33B2X00002000006

【使用目的又は効果】

本品は血糖値測定等のための微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【使用方法等】

- 1.穿刺器具は専用の穿刺器具(販売名:ワンタッチアクロ)を使用してください。
 - 2.穿刺針を穿刺器具に挿入してください。このとき穿刺器具の確認窓全体がオレンジ色になるまでしっかりと差し込んでください。
 - 3.保護キャップをねじって取りはずしてから採血してください。
 - 4.使用後は、廃棄してください。
- ※詳細な使用方法は穿刺器具の添付文書を参照してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1.指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- 2.果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
- 3.以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
- 4.耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

<その他の注意>

- 1.本品はワンタッチアクロ専用の穿刺針ですので、それ以外の穿刺器具に装着して使用しないでください。
- 2.使用後は、廃棄用の容器に入れ廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿をさけて保管してください。
- 2.使用期間
箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 **株式会社 旭ポリスライダー**
〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2
TEL 0867-42-1171

* 販売元 **LifeScan Japan 株式会社**

お問い合わせ先 **ワンタッチコールセンター**
0120-113-903(無料通話、24時間)