

# 正しく保管・使用を行いましょ

## 高温・多湿をさける

測定器もセンサーも、直射日光や夏場の暑い車中での保管はさげましょ。

室温  
30℃以下  
で保管を



## 冷蔵・冷凍をさける

冷蔵庫・冷凍庫での保管もさげましょ。



## センサーは専用のケースで保管を

付属の専用ケースには乾燥剤が入っており、保管に最適です。センサーを取り出したら、ケースのふたをしっかりと閉め、湿気をさげましょ。



※タッパーやビニール袋への保管はお控えください。

## 測定前は手洗いをし清潔な手指で測定を

果汁や汚れ、消毒のアルコール、水などがついたままだと値に影響がある場合もあります。手洗い、消毒、水分の拭き取り・乾燥をしっかりと行いましょ。



製品についてのお問い合わせはワンタッチコールセンターまで



ワンタッチコールセンター  
**0120-113-903**

**24時間365日**

携帯電話・PHSからでもかけられます。

\*ご使用の製品の添付文書・取扱説明書を参照ください。

ワンタッチベリオフレクト 認証番号: 301AABZX00067000 [製造販売元]  
ワンタッチウルトラビュー 承認番号: 22000BZX00192000 LifeScan Japan株式会社  
ワンタッチベリオビュー 承認番号: 22600BZX00312000 東京都中央区日本橋室町3-4-4  
ワンタッチベリオIQ 承認番号: 22700BZX00318000 OVOL日本橋ビル2F  
ワンタッチベリオセンサー 承認番号: 22400AMX01423000

**Lifescan**  
maker of the **ONETOUCH** brand

LifeScan Japan株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4

OVOL日本橋ビル2F

<https://www.onetouch.jp>

SMBG用測定器

(自己検査用グルコース測定器)

をご使用の患者様に

なぜ

ワンタッチウルトラビュー®から  
ワンタッチベリオシリーズに  
変わったの？

新しい測定器なら  
より使いやすく  
負担が少ないですよ

使い方、すぐに  
覚えられるかなあ



**Lifescan**


maker of the **ONETOUCH** brand

# 新しい国際規格へ 点着方法が変わりました。

なぜワンタッチウルトラビュー®から  
ワンタッチベリオ®シリーズに変わったの？



LFSクイックセンサー®  
(ワンタッチウルトラビュー®)の点着方法

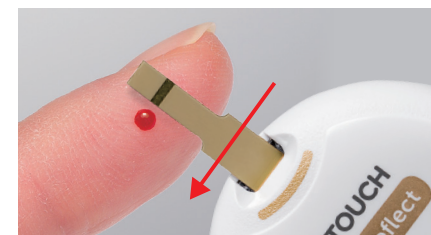

ワンタッチベリオ®センサー  
(ワンタッチベリオフレクト™、ワンタッチベリオビュー®)の点着方法

## SMBGには国際的な規格 (アイ・エス・オー $ISO_{15197}$ ) があります

みなさんの使われているSMBG用測定器には、  
精度や安全性について、世界共通  
の基準が設定されています。



ISO※は、  
非常口のマークなど  
世界共通の基準を決めて  
いるところです



## SMBGの国際規格は2013年に改定

2013年に10年ぶりに規格改定が行われ、  
新しい基準を満たした測定器はさらに  
誤差が少なくなっています。

なるほど  
国際規格に合わせて  
誤差がより少なく  
なるのか



※ISO (International Organization for Standardization/国際標準化機構):  
身の回りのさまざまな工業製品をはじめ  
計測単位、食品、技術から、医療まで幅広く  
安全性や品質の規格を定めています。

## 測定器によって値の出し方が違います



測定器により、血糖値を測るしくみは異なります。そのため、  
測定器の種類が違くと、測定値が異なる場合もあります。  
測定器を変えると、前とくらべて高いことや、  
低いことがあるのはそのためです。

患者さん  
自身が使う  
測定器

患者さんの  
自己管理が目的。

また、SMBG用測定器と  
病院の検査機器とは目的が異なります。

病院に  
ある診断用  
検査機器

病気の診断が目的。  
求められる精度基準も高い。

病院では、検査結果の違いも考えて治療に役立てますので、ご安心を。  
しかし、ご自身の感覚と測定器の値との間に、開きがあると感じたときは、  
ご遠慮なく医師等にご相談ください。

